



RESPIRÁTOR FFP2

Model KDD1001

Briton Group Limited,
London, United Kingdom

Návod k použití k filtrační polomace FFP2 NR

Popis: Filtrační polomaska FFP2 (non-medical), skládaná,
EN 149:2001 + A1:2009, **Materiál:** Netkaná textilie, melt-blown textilie
Záruční doba: 2 roky

Podmínky skladování:

Teplota mezi -20° C až 40° C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Mělo by být zaručeno, že produkty ve skladu a při přepravě budou nepoškozené, neznečištěné, neovlivněné vlhkostí. Věnujte pozornost protipožární ochraně, odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhýbejte se umístění na světle.

Oznámený subjekt: CE 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)

INSTRUKCE



Návod k použití:

Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce. Ověřte si, jestli je maska neporušená. **1)** Otevřete skládací masku. **2)** Ujistěte se, že měkká nosní lišta se nachází na horní straně. **3)** Nasadte si pásek na ucho. **4)** Upravte měkkou nosní lištu tak, aby obepínala nosní část. **5)** Ujistěte se, že můžete dobře dýchat a pokud je to nutné, upravte si masku.

Varování:

Tato maska s označením „NR“ je určena pouze k jednorázovému použití, nesmí být používána déle než jednu směnu, maximálně 12 hodin. Tato maska pomáhá chránit proti určitým kontaminujícím částicím, ale zcela nevyklučuje vystavení riziku nakažení chorobou či infekcí. Masku okamžitě vyměňte, pokud je dýchání obtížné, nebo pokud dojde k zvlhčení nebo poškození masky.